



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

دستورالعمل شستشو و گندزدایی آمبویگ



تهیه و تدوین :

مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مجمع سوپروایزران کنترل عفونت

تحت نظارت:

دکتر رحیم رئوفی (فوق تخصص عفونت های بیمارستانی) - مشاور کمیته کنترل عفونت دانشگاه

خرداد ماه ۱۴۰۵

مقدمه:

این دستورالعمل با هدف ارائه پروتکلی یکپارچه، علمی و مبتنی بر شواهد جهت پاکسازی و ضدعفونی آمبویک ها تدوین شده است.

هدف:

استانداردسازی فرآیند آلودگی زدایی، ضدعفونی، نگهداری و کنترل دوره‌ای آمبویک به منظور پیشگیری از انتقال عفونت و حفظ آمادگی تجهیزات

دامنه کاربرد:

کلیه بخش های درمانی و پاراکلینیک

آمبویک:

آمبویک و متعلقات آن از تجهیزات تنفسی محسوب شده و بدلیل تماس با مخاط دهان و حلق، وسیله ای نیمه بحرانی (Semi-critical Device) محسوب می شود و پس از استفاده برای بیمار، نیازمند گندزدایی سطح بالا (High-level Disinfection) یا استریلیزاسیون طبق دستورالعمل سازنده است.

مسئولیت‌ها:

- سوپروایزر کنترل عفونت: نظارت بر اجرای صحیح فرآیند
- سرپرستاران: پایش اجرای دستورالعمل
- کارکنان بخش: اجرای صحیح دستورالعمل
- کارشناس بهداشت محیط: نظارت بر استفاده صحیح از محلول ها

روش اجرا:

فرآیند آلودگی زدایی آمبو بگ پس از استفاده

۱. انتقال قطعات جدا شده آمو بگ استفاده شده با استفاده از ظرف مخصوص نگهداری به اتاق کثیف
۲. رعایت بهداشت دست ها
۳. پوشیدن گان یا لباس ضد آب
۴. پوشیدن ماسک
۵. استفاده از شیلد محافظ صورت
۶. پوشیدن دستکش کار
۷. آبکشی قطعات با آب سرد
۸. گذاشتن قطعات داخل سینک حاوی آب و برس کشیدن داخل آب (با دمای زیر ۴۵ درجه)
۹. آبکشی قطعات
۱۰. شستشو با آب و ماده شوینده با استفاده از برس نرم
۱۱. آبکشی قطعات
۱۲. پس از خشک شدن آب موجود روی قطعات، غوطه ور کردن در محلول گندزدای سطح بالا طبق دستورالعمل شرکت تولید کننده محلول
۱۳. آبکشی قطعات
۱۴. شستشو و گندزدایی ظرف مخصوص نگهداری آمبو بگ و خشک کردن آن
۱۵. انتقال آمبو بگ خشک شده با استفاده از ظرف مخصوص، به ترالی کد

تبصره:

* در صورت عدم استفاده، سطوح خارجی آمو بگ و ظرف نگهداری، به صورت هفتگی، بعد از رعایت بهداشت دست، با الکل ۷۰٪ گندزدایی گردد.

* قبل از شروع فرآیند شستشو و گندزدایی، لازم است آمبو بگ به طور کامل از اجزای تشکیل دهنده (کیسه، ماسک، شیر یک طرفه) جدا شده و تمامی قطعات به دقت از نظر وجود هرگونه آسیب فیزیکی،

پارگی یا گرفتگی مورد بازرسی قرار گیرند. در صورت مشاهده هرگونه نقص، از استفاده مجدد و ادامه فرآیند خودداری کرده و جهت تعمیر یا جایگزینی اقدام شود.

* ظروف نگهداری باید از جنس قابل شستشو و مقاوم در برابر موارد گندزدا بوده و امکان نظافت و گندزدایی آن ها وجود داشته باشد.

* در صورت استفاده از زیپ کیپ برای نگهداری آمبوبگ، پس از هر بار گندزدایی (و در صورت عدم استفاده، بصورت هفتگی)، زیپ کیپ نیز تعویض گردد.

* در صورت عدم استفاده و صرفا چک روزانه تجهیزات، رعایت بهداشت دست الزامی است.